

# 補助手すりシリーズ 取扱説明書

このたびはビニフレームの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。  
また、いつでもお読みいただけるように、大切に保管してください。

販売店・工務店・施工店様（取扱店様）へ  
この「取扱説明書」は施工後、お客様または入居者様へ必ずお渡しください。

## 本製品を安全にご使用いただくためのご注意 および お願い

### 樹脂被覆材

- 樹脂被覆材は可燃性です。燃料タンクなどの危険物および熱風が出る排気口の近くには設置しないでください。  
ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
- 樹脂被覆材の近くで火気を使用したり、高温のものを近づけたりしないでください。  
変形・変色・破損のおそれがあります。
- 樹脂被覆材は、摩擦により静電気を帯びることがありますので、あらかじめご承知ください。

### 補助手すり全般

- 本来の目的以外の用途で使用しないでください。  
補助手すりは歩行補助を目的とした製品です。
- ボルト、ナット、ネジをゆるめないでください。手すりが外れ、ケガをするおそれがあります。
- ネジがゆるむ原因になりますので、むやみに手すりをゆすったり、ぶら下がったりしないでください。
- 漏電や感電など思わぬ事故の原因になりますので、穴を開けて改造したり、  
アンテナや電線・電気コードを取り付けたりしないでください。
- 安全上、手すりにふとんやプランターなどの重いものを掛けしないでください。  
製品に破損のおそれが生じます。
- 強い衝撃を与えないでください。製品が破損し、思わぬ事故の原因になります。

## 本製品のお手入れをする際のご注意 および お願い

### 快適にご使用いただくためのお願い

定期的な点検・清掃してください。（目安は、年に1～2回です。）  
汚れやホコリを長期間放置しておくとシミや劣化、腐食の原因となります。  
※海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、  
こまめにお手入れしてください。

### お手入れをする際のご注意

- 製品の消毒にはアルコール成分を含む消毒液は絶対に使用しないでください。  
アルコール成分を含む消毒液は有機溶剤となり、塗装面や樹脂がアルコールに溶けて  
変色するおそれがあります。
- 酸性・アルカリ性、塩素系、有機溶剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。
- 金属製ブラシ、金べらを使用しないでください。表面を傷めます。
- 薄めた中性洗剤を汚れた部分に直接スプレーしたり、直接かけたりしないでください。  
液だれにより白くなったり、シミの原因となります。



### 〈お手入れ方法〉

- ①表面についた砂やホコリをていねいに取り除きます。
- ②水でぬらした柔らかい布またはスポンジで軽く拭き、表面についた汚れを拭き取ります。  
[汚れがひどい場合]
  - ①中性洗剤を水で薄め、柔らかい布やスポンジで汚れを落とします。
  - ②洗剤成分が残らないよう十分に水洗いします。
  - ③乾いた布で水分をふき取ります。

## 修理依頼について

修理のご依頼にあたっては、まず次のことをお確かめください。

- 製品名
- 工事名(物件名)
- 工事日(竣工日)
- 施工業者(代理店)
- 破損箇所や不具合状況

例) ・手すりがぐらつく。  
・ねじが外れている。

■メモ(おぼえのため記入しておくとう便利です。)

製品名	
工事名(物件名)	
工事日(竣工日)	年 月 日
施工業者(代理店)	
	TEL ( ) -
備考	

## 製品保証について

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に当社の責任により故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの販売店、工務店、施工店または当社営業所に修理をご依頼ください。

### ■保証期間

施工者よりの引渡し日(注)から2年間。

(注)新築注文住宅の場合は施主様、新築分譲住宅(建売住宅)、新築分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。

### ■製品対象

ビニフレームブランドで販売している補助手すり

### ■保証内容

製品の取扱説明書、表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生し、かつ保証期間内に当社へご連絡をいただいた場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。\*1

ただし、出張修理の場合は、交通に要する実費を戴く場合があります。なお、当社製品以外の不具合については保証対象外です。

- この製品保証は日本国内においてのみ適応されるものとし、日本国外に納品される製品については適応しないものとします。
- 修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

・製品名 ・お引渡し日 ・販売店、工務店、施工店(取扱店) ・破損箇所や不具合状態

### ■免責事項

保証期間内でも、次に例示されるような場合には免責事項となるため有料修理となります。


- 当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など)
- 製品の取扱説明書、表示ラベル、カタログにて記載した使用方法を守らない場合や、禁止されている使用方法をされた場合でこれにより生じた不具合など
- 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、耐風圧強度、耐積雪量に起因する不具合など)
- 建築躯体の変形など製品以外に起因する製品の不具合
- 製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化、材料特性に伴う現象(樹脂部分の変質、変色、色あせなど)またはこれらに伴う錆、カビ、またはその他の不具合\*2
- 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、豪雪、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- 実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- 犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
- 引渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことに起因する不具合
- お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合
- 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- 上記に定める他、利用者または第三者の行為に起因して不具合が発生した場合や、自然災害、動植物に起因する場合に限らず、不可抗力に起因して不具合が発生した場合

\*1 保証期間経過後にご連絡いただいた場合の修理、交換などは有料といたします。

\*2 次のような消耗品は有料になります。 カバー、キャップ類、合成樹脂製部品 など

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、もよりの当社営業所にお問い合わせください。

この「取扱説明書」を紛失した場合、また本体表示ラベルが破損した場合は再発行いたします。お気軽に取扱店またはもよりの営業所へご連絡ください。ただし、当該製品の廃止後は、ご容赦いただく場合があります。

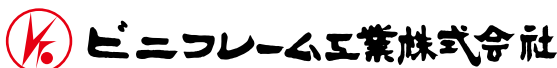

本社・工場 / 富山県魚津市北鬼江616番地




### ビニフレームのWEBサイト

製品情報・施工事例・カタログ・CADデータなどの各種情報を閲覧できます。

<https://www.vinyframe.co.jp/>

### ◎全国サービスネットワーク

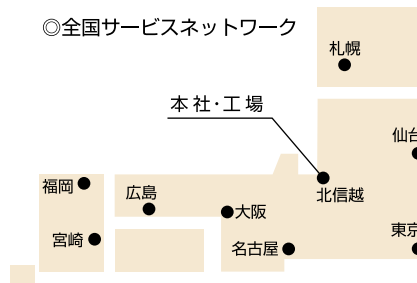

本社 TEL 0765-24-1032 FAX 0765-24-1051  
札幌 TEL 011-624-5080 FAX 011-633-7088  
仙台 TEL 022-288-2141 FAX 022-288-5070  
東京 TEL 03-5204-0820 FAX 03-5204-0824  
北信越 TEL 0765-55-1208 FAX 0765-55-1206  
名古屋 TEL 052-703-8850 FAX 052-703-8234  
大阪 TEL 072-645-2626 FAX 072-645-2627  
広島 TEL 082-291-8251 FAX 082-291-8260  
福岡 TEL 092-541-7771 FAX 092-541-7701  
宮崎 TEL 0986-46-5180 FAX 0986-46-5100

インドネシア PT. NIPPON CARBIDE INDUSTRIES INDONESIA  
TEL +62-21-897-1177

AM-Z-0781-NT1 23.08(V)